

# One Step Graviditetstest

## Sticka – Urintest

Wondfo – One Step HCG Urine Test - Strip  
REF W1-S3

Detta One Step Graviditetstest är ett enkelt och lättanvänt urintest som visar resultat snabbt. Testet mäter mängden Human Chorion Gonadotropin (HCG) i kvinnans urin. Förekommer en viss nivå av HCG är testet positivt och kvinnan är med mycket stor sannolikhet gravid.

Graviditetstestet kan användas redan första dagen menstruationen uteblivit. Testet används endast för hemmabruk och bara för utvärtes bruk.

### Testet och graviditetshormonet (HCG):


Bara några få dagar efter ett ägg har befruktats börjar hormonet Human Chorion Gonadotropin att bildas. Hormonet kallas i dagligt tal för graviditetshormonet och förkortas HCG.

I regel kan HCG-nivån i urinen mätas efter 6-15 dagar efter befruktningen. Hur lång tid det tar innan HCG-nivån kan mätas beror bl.a. på hur stor mängd HCG kvinnan utsöndrar i urinen.

### Goda råd innan du genomför testet:

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan testet utförs. Man kan göra tester hela dygnet men för att få ett mer precist resultat bör testet utföras på morgonen, då HCG-hormonet är mest koncentrerat.

### Folieförpackningens innehåll:

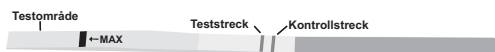

- Graviditetstestet.
- Påse med fuktuppsugande material - Får inte förtäras och skall hållas otillgängligt för barn.

### Vad behöver du mer?

- En ren och torr behållare av t.ex. plast för urinprovet
- Klocka eller tidtagarur

### Bra att veta


- En läkare bör bekräfta diagnosen graviditet.
- Om ett urinprov är för tunt (vattnigt) kan andelen HCG tillfälligt vara missvisande låg. Om man misstänker att man är gravid bör ett nytt test genomföras inom 48 timmar.
- HCG-nivån kan vara väldigt låg i den mycket tidiga graviditeten och inte ge utslag på testet. Genomför ett nytt test inom 48 timmar.
- HCG nivån kan vara förhöjd av andra orsaker än graviditet. För att kunna ställa diagnosen graviditet skall dessa orsaker vara uteslutna.
- HCG-test kan inte skilja en normal graviditet från ett utomkvedshavandeskap. Missfall kan medföra att resultaten av testen är svåra att tolka.
- Sterilitetsbehandling (HCG-baserad) kan orsaka falska resultat. Ta kontakt med din läkare.

### Så genomförs testet:

1. Testet och urinen skall vara omkring rumstemperatur (15°C till 30°C)
2. Kissa i en ren och torr behållare t.ex. en liten mugg. Det bästa sättet att fånga upp urinen är att hålla behållaren i mitten av urinstrålen.
3. Öppna folieförpackningen med testet och ta ut teststicken. Folieförpackningen öppnas lättast vid det lilla hacket på sidan av förpackningen.
4. För ner stickan i urinen. Pilen som finns på testet skall peka ner mot urinen.

**VIKTIGT: Urinen får inte komma i kontakt med området över max (maximum) linjen, eftersom testet då kan få ett missvisande resultat.**

MAX-linjen

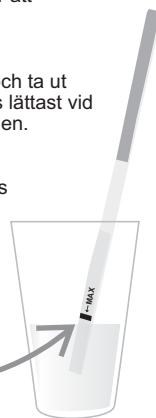

5. Ta upp stickan när det har gått 3 sekunder och lägg den på en ren och torr yta ev ett material som inte suger - t.ex. folieförpackningen.

6. Inom kort kommer det att synas streck på testet. Oavsett mängden hormon i urinen kan ett positivt resultat ibland synas efter bara 40 sekunder, men för att vara helt säker på resultatet bör man invänta testets fulla reaktionstid på 5 minuter.

**VIKTIGT! Testets resultat bör läsas av efter max 5 min. Eventuella förändringar som sker på testet därefter bör man bortse från.**

### Att läsa av resultatet:

Håll testet med testområdet pekandes åt vänster.

### Positivt test (gravid)



Om det syns två streck på teststaven är testet positivt. Testet har funnit HCG i urinen och detta betyder att du med mycket stor sannolikhet är gravid.

**Observera:** Om teststrecket har en mycket svag färg rekommenderas att man genomför ett nytt test inom 48 timmar.

### Negativt test (ej gravid)



Om det inte syns något teststreck utan bara ett kontrollstreck är testet negativt.

Om din menstruation uteblir eller om du fortfarande känner dig gravid så gör ett nytt graviditetstest. HCG-nivån i urinen fördubblas som regel efter 2-3 dagar, vilket leder till att resultatet kan förändras från en dag till nästa om du är gravid.

### Misslyckat test



Om det inte syns något test eller endast ett teststreck så är testet misslyckat. Genomför ett nytt test. Om det andra testet också blir misslyckat, ta kontakt med återförsäljaren och uppge testets LOT nummer som finns på folieförpackningen.

### Viktig information!

- Testet skall bara användas vid in vitro diagnostik.
- Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
- Förvara folieförpackningen på en plats som är otillgänglig för barn.
- Efter användande bör testet kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall
- Använd inte testet om folieförpackningen är skadad.
- Testet kan inte återanvändas.
- Testet är endast för utvärtes bruk.
- Får ej förtäras.

### Förvaring och hållbarhet:

- Testet förvaras i den obrutna folieförpackningen i mellan 4°C till 30°C.
- Testets hållbarhetstid finns på folieförpackningen. Hållbarheten anges månad/år. Efter hållbarhetsdatumet skall testet kastas bort.
- Testet skall förvaras torrt och skyddas mot solljus.

### Frågor och svar:

**Det är stor skillnad på kontrollstrecken på två olika tester, har det någon betydelse?**

Nej. Variationer i färgen på kontrollstrecken har ingen betydelse.

### Kan testresultatet läsas av efter mer än 5 minuter?

Nej. Testresultatet skall läsas av inom 5 minuter. Ett negativt resultat kan ändras bara ett par minuter efter testtiden tagit slut till ett falskt positivt resultat. För att undvika missvisande resultat är det bäst att läsa av resultatet när testtiden är slut och sedan kasta bort testet.

### Testet visar ett positivt resultat. Vad skall jag göra?

Om testet är positivt bör du kontakta din läkare för att få vidare hjälp och uppföljning av graviditeten.

### Testet är negativt, men min menstruation uteblir?

Om din menstruation uteblir och testet har gett ett negativt resultat bör du genomföra ett nytt test efter 2-3 dagar. Om du får samma resultat igen men ändå misstänker att du är gravid bör du ta kontakt med din läkare.

### Testet visar inget kontrollstreck.

Om det inte framträder något kontrollstreck inom 5 min är testet misslyckat. Du har troligtvis använt för mycket eller för lite urin. Gör ett nytt test och följ bruksanvisningen noggrant.

### Hur kan olika mediciner eller sjukdomar påverka resultatet?

Läs alltid de uppgifter som finns till medicinen du använder eller tala med en läkare innan du genomför testet.

### Resultatområdet blir rosaaktigt och det syns vertikala streck, har det någon betydelse?

Nej. Olika fysiska yttre faktorer kan vara orsaken t.ex. kan olika urinprov variera i sin kemiska sammansättning och luftfuktigheten förändras. Så länge test och kontrollstrecken framträder inom 5 minuter är resultatet tillförlitligt.

### Tillverkare:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.  
Wondfo Scientech Park  
South China University Of Technology,  
Guangzhou, Kina

### Auktoriserad representant:

Qarad b.v.b.a.  
Volmolenheide 13  
B-2400 Mol, Belgium



Skyddas mot solljus



Förvaras i mellan 4 och 30°C



Förvaras torrt



Kan inte återanvändas



Endast för in vitro-diagnostik



Fabrikant / Tillverkare



Auktoriserad Europeisk Representant



Läs igenom bruksanvisning före bruk



Bäst före datum



0537