

GRAVIDITESTEST

Läs all information i denna bilaga innan du utför testet.

One Step Gravitetstest sticka är en in-vitro testanordning för hemmabruk avsedd för snabb bestämning av humant koriongonadotropin (hCG) i urinen för att underlätta tidig upptäckt av graviditet.

Du kan enkelt utföra testen själv.

Avsett för hemmabruk.

Endast för in-vitro diagnostik

HUR FUNGERAR DET?

Humant koriongonadotropin (hCG) är ett hormon som produceras av den bildande moderkakan och utsöndras i urinen. Gravitetstestet innehåller antikroppar som specifikt reagerar med detta hormon.

När testens absorberande ände doppas i urinprovet, migrerar urinen längs remsan.

När hCG i provet når membranet i testzonen, kommer det att bilda en färgad linje. Frånvaron av denna färgade linje indikerar ett negativt resultat.

En färgad linje kommer att visas i kontrollzonen om testet har utförts ordentligt.

TESTKITETS INNEHÅLL

1. En påse som innehåller en teststicka.
2. Bruksanvisning.

VAD MER BEHÖVER DU?

En ren, torr, plast- eller glasbehållare för att samla urinen.

Timer eller klocka.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Detta kit är endast avsett för extern användning. Svälj inte.
2. Kassera efter första användning. Teststickan kan inte användas mer än en gång.
3. Använd inte testet efter det utgångsdatum som är tryckt på foliepåsen.
4. Använd inte testen om påsen är punkterad eller inte förseglad.
5. Förvaras utom räckhåll för barn.

LAGRING OCH STABILITET

1. Förvara vid 4°C till 30°C i den förseglade påsen fram till utgångsdatumet.
2. Förvaras undan från direkt solljus, fukt och värme.
3. Frys INTE.
4. Du bör utföra testet strax efter att påsen har öppnats. Du ska förvara testet i en torr miljö före användning.

NÄR SKA URINPROVET UPSAMLAS?

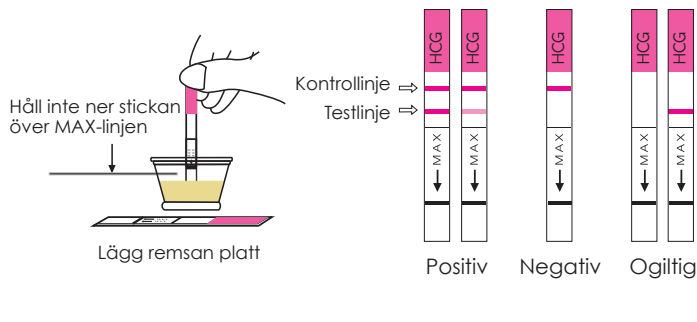
För många kvinnor kan hCG vara detekterbart med detta test från dagen efter den uteblivna menstruationen. Varje urinprov är lämpligt för gravitetstest men det första urinprovet på morgonen är optimalt på grund av dess högsta koncentration av hCG.

HUR UPSAMLAS URINEN?

Urinprover kan uppsamlas i en ren och torr plast- eller glasbehållare.

HUR UTFÖRS TESTEN?

1. Teststickan och urinen måste ha rumstemperatur för testning.
2. Ta ut teststickan från den förseglade påsen.
3. Håll stickan ned i urinen med pilen pekande mot urinen. Ta ut stickan efter 5 sekunder och lägg stickan platt på en ren, torr, icke-absorberande yta (t.ex. kanten på uppsamlingsbägaren).
VIKTIGT! Låt inte urinnivån överstiga MAX (markeringsstrecket) - det kan annars medföra att testet inte fungerar korrekt.
4. Läs av resultatet inom fem minuter. Ibland kan positiva resultat förekomma så tidigt som efter en minut, men man bör vänta hela 5 minuter innan ett negativt resultat avläses. Läs inte av resultat efter mer än 5 minuter.

**HUR TOLKAS RESULTATEN?**

Negativt (inte gravid):

Endast en färgad linje visas i kontrollzonen. Ingen synlig linje i testzonen. Detta indikerar att ingen graviditet har upptäckts.

Positivt (gravid):

Tydliga färgade linjer visas i kontroll- och testzonerna. Det indikerar att du är gravid.

Ogiltig:

Inga synliga linjer alls, eller så finns det bara en synlig linje i testzonen och inte i kontrollzonen. Upprepa med en ny testförpackning.

OBS: Om färgen i testzonen är svag rekommenderas att testet upprepas om 48 timmar, eller om testet visar negativt men du misstänker att du fortfarande är gravid, så kan testet upprepas efter några dagar.

VAD DU GÖR NÄR DU KÄNNER TILL RESULTATET

OM RESULTATET ÄR POSITIVT (TVÅ LINJER)

Kontakta din barnmorska/läkare. Hen bör bekräfta din graviditet efter att ha utvärderat alla kliniska fynd och laboratoriefynd. I vissa sällsynta situationer kan testet ge ett falskt positivt resultat. Hen kommer också att ge dig ytterligare information och råd om din graviditet.

Se även "Förstå testresultat".

OM RESULTATET ÄR NEGATIVT (EN LINJE)

Om du har skäl att tro att du är gravid (t.ex. utebliven menstruationsblödning), kan du upprepa testet några dagar senare.

Om testet är fortfarande negativt, kontakta din barnmorska/läkare.

Se även "Förstå testresultat".

FÖRSTÅ TESTRESULTATET

1. Om ett urinprov är för utspätt kanske det inte innehåller en representativ nivå av hCG. Om graviditet fortfarande misstänks, bör ett annat urinprov uppsamlas 48 timmar senare och testas.
2. Låg koncentration av hCG i en mycket tidig graviditet kan ge ett negativt resultat. I detta fall bör ett nytt prov erhållas vid minst 48 timmar senare och testas.
3. All behandling med hCG kan orsaka falska resultat.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Även om tidiga hCG-nivåer varierar hos normalt gravida kvinnor, visar detta hCG-test det exakta resultatet från den första dagen efter utebliven menstruation.

FRÅGOR

1. Det finns en stor skillnad mellan kontrollinjerna i två tester. Är detta något att oroa sig över?

Nej. Variationer i kontrollinjens färg påverkar inte testresultatet.

2. Kan testresultat tolkas efter mer än fem minuter?

Nej. Testresultaten måste läsas inom fem minuter. Ett negativt resultat kan ändras till falskt positivt inom några minuter efter testets avläsningstid och är då inte längre ett korrekt resultat. Det är alltid bäst att avläsa resultatet vid tiden 5 minuter och sedan kassera testen för att undvika förvirring.

PRESTANDA/EGENSKAPER

Känslighet:

One Step Gravitetstest sticka har en känslighet på 10 mIU/ml.

Störande ämnen:

Följande potentiellt störande ämnen tillsattes till hCG negativa och positiva prover utan att det sågs några störningar.

Acetaminophen, aspirin, askorbinsyra, atropin, koffein, glukos, hemoglobin, tetracyklin, ampicillin, albumin, bilirubin.

Stabilitet efter första öppningen:

Resultaten av öppnade paket vid stabilitetsstudier visar att produktkvaliteten var stabil och giltig inom 1,5 timmar. Med tanke på variationer i temperatur och luftfuktighet som kan uppstå, föreslår vi att du använder testa omedelbart efter öppnandet.

REGISTER ÖVER SYMBOLER

	Tillverkare		Produktionsdatum
	Europeisk representant		Temperaturgräns
	Användningsdatum		Kan inte återanvändas
	Batch kode		Läs bruksanvisningen
	Varning		Endast för in vitro-diagnostik
	Innehåller tillräckligt för <n> tester		Katalognummer

PRODUCERAD FÖR

Smilelab Co., Ltd.
B-321, 167, Songpa-daero, Songpa-gu,
Seoul, 05855, Republic of Korea
© 2021 Smilelab Co., Ltd.
www.smilelab.co

TILLVERKAD I KINA

Co-Innovation Biotech Co. Ltd
No. 9 Baihe 3 Street, Economic And
Technological Development East Zone,
Guangzhou 510530, Guangdong P.R. China
Tel:+86-20-82109823 Fax:+86-20-82109823

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax:+49-40-255726

0123

P/N: 181101
Rev. 11.2018



Distributör:
Filial af E-Invasion A/S
Stålkulegatan 2 E
SE-212 28 Malmö
Babyplan.com

Mer information på Babyplan.se/smile