

# Babyplan® Graviditetstest Sticka

## Bruksanvisning



## Förklaring till symboler på förpackningen

	Skyddas mot solljus		Kan inte återanvändas
	Förvaras torrt		Utgångsdatum
	Förvaras mellan 4°C - 30°C		OBS! Läs bruksanvisningen för korrekt användning
	Endast för in-vitro diagnostik		Batchkod
	Katalognummer		Försiktighet! Läs bruksanvisningen
	Innehåller tillräckligt för <n> tester		Europeisk representant
	Importör		

One Step HCG Urine Test

 W1-S

 0123



**Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.**

No. 8, Lizhishan Road, Science City  
Luogang District  
510663 Guangzhou, Kina  
Tel: 0086-20-8711-1194  
E-mail: sales@wondfo.com.cn



**Qarad BV**

Cipalstraat 3  
2440 Geel  
Belgien



E-Invasion A/S  
Artillerivej 86, 1  
2300 København S  
Danmark  
E-mail: info@babyplan.se



**Babyplan®**

När stora drömmar ska gå i uppfyllelse, är det ofta de små sakerna som gör skillnad. Låt Babyplan hjälpa dig med att öka dina möjligheter för att bli gravid.

**Babyplan.se**

resultatet vid testperiodens 5 minuter, och därefter kasta testet; detta för att undvika förvirring.

**En rosa bakgrundsfärg och vågräta streck visades i resultatområdet under testperioden. Är detta något jag behöver bry mig om?**

Nej. Varje urinprov kan variera i dess kemiska struktur, och så även den omgivande luftfuktigheten i rummet. Sådana variationer i de fysiska villkoren kan medföra små vågräta streck och/eller rosafärgad bakgrundsfärg, men påverkar inte testresultatet. Så länge kontrollstrecket visas inom fem minuter, så fungerar testet som det ska.

## Bibliografi

- Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
- Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795

## Känslighet & noggrannhet

### Känslighet:

Babyplan Graviditetstest reagerar på hCG om koncentrationen av hCG är 25mIU/ml eller mer.

### Noggrannhet:

Babyplan Graviditetstests tillförlitlighet har fastslagits genom laboratorietester med kända mängder av luteniserande hormon (hLH), follikelstimulerande Hormon (hFSH) och sköldkörtelstimulerande hormon (hTSH). Negativa resultat erhöles från alla tester som utfördes med 300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH och 1000 µIU/ml hTSH.

## Frågor & svar

**Det är stor färgskillnad mellan kontrollstrecken på två test. Är detta något jag behöver bry mig om?**

Nej. Variationer i kontrollstreckens färg påverkar inte testresultatet.

**Kan testresultaten avläsas efter mer än fem minuter?**

Nej. Testresultaten måste avläsas inom 5 minuter. Även om ett positivt resultat inte bör förändras på flera dagar, kan ett negativt resultat ändras till ett falskt positivt inom några minuter efter avläsningstidens slut. Det bästa är att alltid avläsa

- Låg koncentration av hCG kan, i mycket tidig graviditet, medföra negativa resultat. I så fall bör ett nytt test utföras efter 48 timmar, där ett nytt urinprov används.
- Förhöjda nivåer av hCG kan orsakas av några få tillstånd förutom vid graviditet. Därför bör man inte använda påvisandet av hCG i urinen som ett sätt att diagnostisera graviditet om inte dessa tillstånd först har eliminerats.
- En normal graviditet kan inte särskiljas från utomkvedshavandeskap baserat på hCG allena. Också spontanaborter kan medföra förvirring vid tolkningen av testresultat.
- Sterilitetsbehandlingar som baseras på hCG kan medföra falska resultat. Hör med din läkare.
- Detta test är för kvalitativ screeninganalys. Det är inte utvecklat för att bestämma kvantitativa koncentrationer av hCG.
- Enheten är endast lämplig för human urintestning.
- Orent urinprov, eller störande ämnen i urinen kan medföra falskt resultat.
- Oren testenhet kan medföra falskt resultat.

## Förväntade resultat

Negativa resultat förväntas ses hos friska icke-gravida kvinnor och friska män. Även om tidiga hCG nivåer hos gravida kvinnor kan variera, är det möjligt att med Babyplan Graviditetstest registrera graviditet så tidigt som 1 dag efter den uteblivna menstruationen.

## Viktig information

- Det här testsettet är endast för utvärtes bruk. Får ej sväljas.
- Kastas efter första användningen. Teststicken kan inte användas mer än en gång.
- Använd inte testsettet efter utgångsdatumet har passerats.
- Använd inte testsettet om foliepåsen är skadad eller inte väl förseglad.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

## Förvaring och hållbarhet

- Förvara vid 4°C - 30°C i den förseglade foliepåsen fram till utgångsdatumet.
- Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
- FÅR EJ FRYNAS.
- Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.

## Begränsningar

- Som med vilket som helst diagnostiskt test, bör en bekräftad graviditetsdiagnos endast ges av medicinskt kunnig personal efter utvärdering av kliniska och laborativa undersökningar.
- Om ett urinprov är för utspätt (dvs. låg specifik gravitation) innehåller det kanske inte en representativ nivå av hCG. Misstänks graviditet ändå, bör man vänta 48 timmar innan ett nytt test utförs med ett nytt urinprov.

## Vad ska man göra när man vet resultatet?

### Om resultatet är positivt (två streck)

Ta kontakt med din barnmorska eller gynekolog, som efter utvärdering av kliniska och laborativa undersökningar, kan bekräfta din graviditet. Vid vissa tillstånd kan testet visa falska positiva resultat. Du får också vidare information och råd angående din graviditet. Se även 'Begränsningar'.

### Om resultatet är negativt (ett streck)

Om du har anledning att misstänka att du är gravid (dvs. menstruationen har uteblivit), kan du utföra ett nytt test om några dagar. Är resultatet då fortfarande negativt bör du kontakta barnmorska eller gynekolog. Se även 'Begränsningar'.

## Hur fungerar det?

Humant choriongonadotropin (hCG), är ett hormon som kort efter befruktning börjar att produceras av den växande moderkakan, och som utsöndras i urinen. Graviditetstestet innehåller antikroppar som reagerar specifikt med detta hormonet. När teststicken hålls ned i urinprovet gör kapilläraktivitet att provet når testzonen i membranet, och där bildar ett färgat streck. Frånvaro av detta färgade streck kan indikera ett negativt resultat. Som en kontroll, bildas ett färgat streck i kontrollzonen om testet har utförts korrekt.

Babyplan Gravitetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet registrerar förekomsten av humant choriongonadotropin ("hCG") som finns i urinen mycket tidigt under graviditeten. Endast för in-vitro självttestning. Endast för utvärtes bruk.



Har du kommit ihåg folsyra?

## Så utförs testet

### Förpackningens innehåll

- En foliepåse innehållande en teststicka och en fuktuppsugande påse. Den fuktuppsugande påsen finns med endast i förvaringssyfte, och används inte i testförfarandet.
- Bruksanvisning.

### Vad behöver du mer?

- En ren, torr, plast- eller glasbägare för att uppsamla ett urinprov.
- Tidtagare (klocka eller tidtagarur).

### Förberedelser innan du utför en test

### När ska testen utföras?

Vid graviditetstestning kan ett urinprov tas när som helst, men den första morgonurinen är optimal, då den har den högsta koncentrationen av hCG.


### Hur ska urinen uppsamlas?

Urina kan uppsamlas i en vilken som helst ren, torr, plast- eller glasbägare.



Betyder viktig information

## Så utförs testet

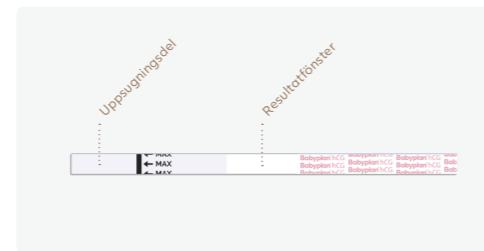

1. Både teststickan och urinen måste ha rumstemperatur (15–30°C) innan testet utförs.
2. Ta ut teststickan ur den förseglade foliepåsen.



3. Håll teststickan ned i urinen med pilen pekande ned mot urinen. Ta upp testet efter **minst 3 sekunder** och lägg stickan plant på en ren, torr och icke-absorberande yta (till exempel kanten på urinbägaren).



Låt inte urinnivån gå över MAX-strecket, då testet annars inte kommer att fungera som det ska.




4. Positiva resultat kan ses så snart som efter 1 minut. För att bekräfta ett negativt resultat bör dock **hela reaktionstiden på 3 minuter** inväntas.




Avläs inte resultatet efter mer än 5 minuter.

## Hur tolkas resultaten?

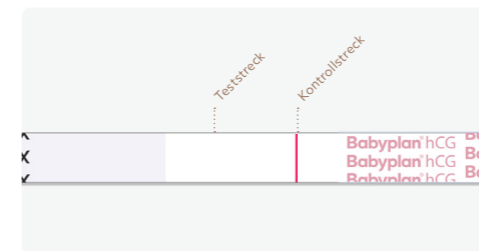


### Negativ (inte gravid):

Endast ett färgat streck visas i kontrollzonen. Inget synbart streck visas i testzonen. Detta indikerar att ingen graviditet kunde påvisas.

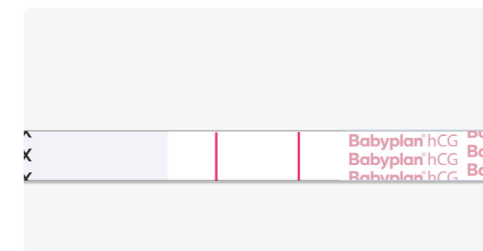

### Positiv (gravid):

Tydliga färgade streck visas i kontroll- och testzoner. Det indikerar att du är gravid. Färgintensiteten på strecken kan variera, då koncentrationen av hCG kan skifta i en graviditets olika skeden.

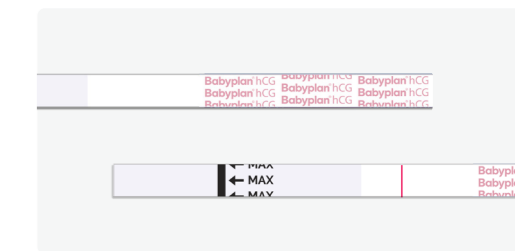

### Ogiltig:

Inga synliga streck alls, eller endast ett streck i testzonen men inget i kontrollzonen. Gör om testet med ett nytt testset. Om detta test också misslyckas; kontakta återförsäljaren eller butiken där du köpte produkten och uppge testets LOT nummer.



Om färgen i testzonen är svag, rekommenderas att ett nytt test utförs om 48 timmar.